



DUPLOREACH 35

Aplicador de Spray Extendido

Exclusivamente
en Baxter

Rápida aplicación de Tissucol Duo en cirugía laparoscópica



Más Opciones en Cirugía... Más eficacia

- Incrementa el número de posibilidades de aplicación de adhesivo de fibrina en zonas de difícil acceso o en cirugía mínimamente invasiva.
- Proporciona de forma efectiva una capa fina, uniforme de adhesivo de fibrina en la superficie de la herida – 2 ml de Tissucol cubren una superficie de hasta 100 cm².

Fácil de Preparar... Fácil de Utilizar

- Se conecta con seguridad al sistema de aplicación de dos jeringas DUPLOJECT.
- Diseñado para ser utilizado con trócares de 5 mm.
- Vaina de acero inoxidable, con acabado mate para evitar reflejos, que proporciona rigidez añadida.
- Punta de sustitución pre-ensamblada y preparada para su uso inmediato.
- Envasado con dos puntas adicionales para varias aplicaciones.



*Envasado Individualmente,
Esterilizado y listo para su uso*



Baxter

DUPLOREACH 35

Aplicador de Spray Extendido

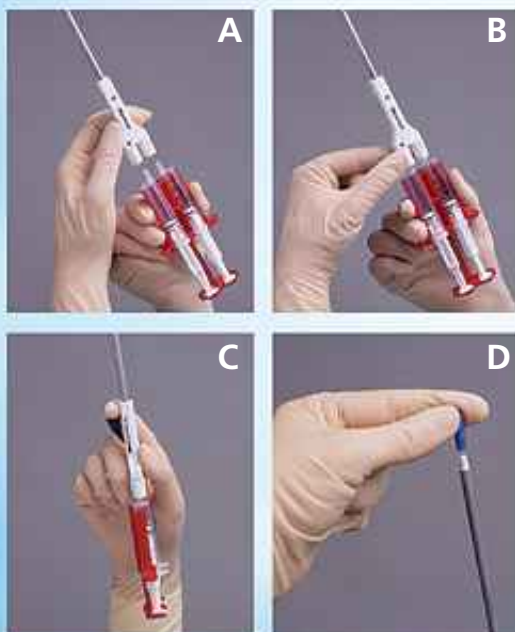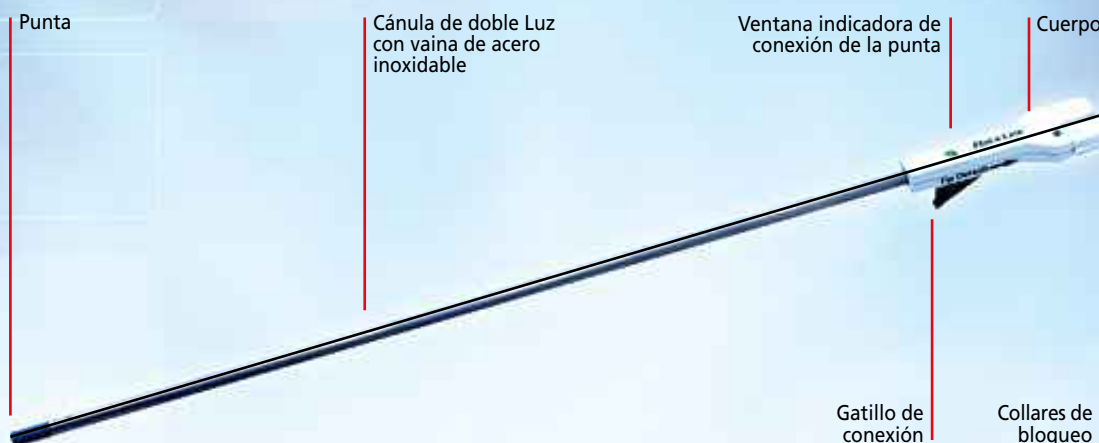

Conexión:

- Unir DUPLOREACH 35 al dispositivo Duploject (foto A).
- Asegurar individualmente cada collar de bloqueo (foto B).
- La punta: no apretar en exceso – media vuelta es suficiente. Un exceso de tensión puede dañar los hilos de rosca del collar de bloqueo y dar lugar a pérdida de conexión.

Aplicación:

- Presionar constante y firmemente para una aplicación uniforme.

Cambio de punta

- Colocar el dispositivo DUPLOJECT en la palma de la mano mientras tiramos del gatillo de conexión (foto C).
- Hay que tener cuidado para evitar presionar el émbolo del dispositivo DUPLOJECT.
- Mientras se tira del gatillo de conexión, sacar la punta usada y sustituirla por otra nueva (foto D).
- Después de unir la punta retirar el dedo del gatillo de conexión. Esto permite que la vaina de acero inoxidable se deslice hacia el lugar de bloqueo de la punta. Para asegurar que la punta está correctamente bloqueada, observar que el punto verde coincide con la ventana indicadora.
- Si el punto verde no está visible, tirar del gatillo de unión y volver a unir la punta. Retirar el dedo del gatillo de unión y comprobar que la conexión es fuerte y segura.

Características:

- Longitud: 35 cm.
- Radiopaco.
- DUPLOREACH 35 no contiene látex de caucho natural.
- Accesorio desechable, no reesterilizable, para un solo uso.
- Una caja contiene 6 unidades de DUPLOREACH 35 empaquetadas individualmente.
- Código de Producto: DUPLOREACH 35 6 pzs. [REF](#)B222350099999